

AQUA MARIS®

AQUA MARIS® Classic

100%-ban természetes eredetű orrspray

Az Adriai-tengerből származó, ásványi sókban és nyomelemekben gazdag tengervíz jótékonyan és természetes módon kezeli, **hidratálja és tisztítja a száraz és irritált ornyálkahártyát**. Kíméletes és hatékony, mindennapi használatra is alkalmas.

ÖSSZETÉTEL

Az oldat az Adriai-tengerből származó, ásványi sókban és nyomelemekben gazdag tengervizet tartalmaz. Az oldatban lévő nyomelemek fontos szerepet töltenek be az ornyálkahártya megfelelő állapotának fenntartásában, ami elősegíti a felső légutak megfelelő működését.

Nem tartalmaz tartósítószeret.

Kiszerezés

30 ml, 200 fújásra elegendő izotóniás, tartósítószer-mentes oldat adagolópumpával ellátott üvegpalackban.

Rendeltetése

A nyálkahártya működése és a szabályos légzés a nyálkahártya állapotától, annak hidratáltságától függ. Az Aqua Maris® Classic orrspray **nedvesíti és tisztítja az orrjáratokat**, és ugyanakkor regenerálja is az ornyálkahártyát.

Mikor és hogyan kell az Aqua Maris® Classic orrsprayt használni?

- A mindennapos orrhigiéna és a jó közérzet fenntartása érdekében orrlyukanként 1-2 befújásnyi oldatot kell bejuttatni. Az eljárás naponta többször is alkalmazható mindaddig, amíg azt szükségesnek ítéli.
- A kiszáradt és irritált orr kezelésére 3-4 befújásnyi oldatot kell bejuttatni mindkét orrlyukba szükség szerinti gyakorisággal. Az orr kiszáradása és irritációja előfordulhat a klimatikus viszonyok megváltozása miatt, kiválthatja például a légkondicionált helyiségek rendkívül száraz levegője, a légszennyezettség, vagy akár a hőmérséklet és a levegő minőségében [utazás során] bekövetkező hirtelen változás is.

A termék első használata előtt a kupakot el kell távolítani, és az adagolópumpát 2-3-szor lenyomva a levegőt ki kell fújni a palackból.

A higiénés szabályok betartása érdekében egy palackot csak egy személy használjon. Ne ossza meg mással a terméket!

Ki használhatja az Aqua Maris® Classic orrspray-t?

Az Aqua Maris® Classic orrspray kíméletes hatásával támogatja a

nyálkahártya megfelelő élettani állapotának fenntartását, és emellett nincs más, az egész szervezetet érintő hatása. Emiatt mindenki számára megfelelő, beleértve a gyermekeket, a várandós nőket és a szoptató anyákat is.

Próbálja ki az Aqua Maris® termékcsalád további termékeit is!

| TERMÉKNÉV | FELHASZNÁLÁS | ÖSSZETÉTEL |
|--------------------------------------|--|---|
| Aqua Maris® Baby orrpray | megszünteti az orrdugulást és eltávolítja a gyermek orrából a szennyeződéseket, a baktériumokat és a vírusokat | izotóniás tengervíz |
| Aqua Maris® Plus orrpray | regenerálja az ornyálkahártyát | tengervíz d-pantenollal |
| Aqua Maris® Strong orrpray | természetes úton szünteti meg az orrdugulást | hipertóniás (nagy sókoncentrációjú) tengervíz |

Figyelmeztetés







Különleges tárolást nem igényel. Gyermekektől elzárva tartandó!
A csomagoláson található lejárati idő után ne alkalmazza a terméket.

Gyártó

JGL d.d., 51000 – Horvátország, Rijeka, Svilno 20.


A használati útmutató utolsó felülvizsgálatának ideje: 2022. június.

A terméken feltüntetett szimbólumok jelentése

-  Olvassa el a használati útmutatót
-  Aszeptikus technikák alkalmazásával sterilizált
-  Gyártó
-  Gyártási szám
-  Lejárati idő
-  CE jelölés



Az Aqua Maris termékek mikroműanyag-mentes tanúsítvánnyal rendelkeznek.

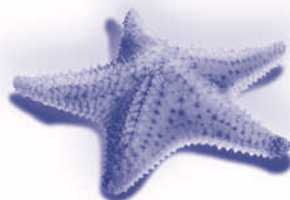

K-28202-1.5

 130002072/05



 0373

