

AQUA MARIS®

AQUA MARIS® Baby

100%-ban természetes eredetű orrspray

Az ásványi sókban és nyomelemekben gazdag izotóniás tengervíz eltávolítja a gyermek orrából a kórokozókat és a különböző szennyeződések.

ÖSSZETÉTEL

Az oldat az Adriai-tengerből származó, ásványi sókban és nyomelemekben gazdag tengervizet tartalmaz. Az oldatban lévő nyomelemek fontos szerepet töltenek be az ornyálkahártya egészséges állapotának fenntartásában, ami elősegíti a felső légutak megfelelő működését.

Nem tartalmaz tartósítószeret.

KISZERELÉS

50 ml oldat, a csecsemők orrának megfelelően kialakított mikroporlasztóval ellátott palackban.

RENDELTETÉSE

Az orrhigiéna fenntartása születésüinktől kezdve fontos. Az orron keresztül való légzés a lélegzés egyetlen helyes módja, ami a gyermek fejlődése és növekedése szempontjából létfontosságú. Az ornyálkahártya kiszáradása, az összegyűlt szennyeződések, a beszáradt orrváladék vagy az ornyálkahártya duzzanata gátolja a gyermek orrában a levegő szabad áramlását. Ez nyugtalanságot, sírást és ingerlékenységet okozhat, ami megszakítja a békés alvást és etetést. A megfázás vagy allergia miatt eldugult orr a teljes légzőrendszer egészségére hatással lehet.

Az ásványi sókban gazdag tengervíz jótékony hatásával támogatja az ornyálkahártya természetes tisztulási mechanizmusát.

MIKOR ÉS HOGYAN KELL AZ AQUA MARIS® BABY ORRSPRAYT HASZNÁLNI?

Az Aqua Maris® Baby, a csecsemők orrlyukának megfelelően kialakított fúvókával az orrüregbe juttatva, fellazítja a besűrűsödött váladékot, eltávolítja a fertőzést okozó részecskéket, a port és egyéb szennyeződések. Ezzel segíti az orrdugulás megszüntetését, és az ornyálkahártya hidratálását, regenerálását.

15 napos kortól, mindennapos használatra alkalmas.

Aqua Maris® Baby orrspray javasolt:

- a mindennapos orrhigiéna fenntartására,
- nátha vagy megfázás esetén szoptatás és cumisüvegből történő etetés előtt, fülfertőzések esetén a kezelőorvosa által javasolt kezelés támogatásaként,
- a központi fűtéses vagy légkondicionált helyiségek száraz levegője miatti orrszárazság esetén és
- orron át alkalmazott gyógyszerek [orcseppek vagy orrspray-k] használata előtt.

Az Aqua Maris® Baby-t naponta 2-6 alkalommal kell mindkét orrlyukba befújni szükség szerinti gyakorisággal. Használat után a fúvófejet mossa le és szárítsa meg.

Nagyobb mennyiségű szennyeződés és váladék puhításához és eltávolításához fújjon bőséges mennyiségű Aqua Maris® Baby-t mindkét orrlyukba. Ezt mindaddig lehet ismételni, amíg a szennyeződés vagy a váladék annyira meg nem puhul, hogy könnyen eltávolítható az orrból.

Az Aqua Maris® Baby orrspray kíméletes hatásával támogatja a nyálkahártya megfelelő élettani állapotának fenntartását, és emellett nincs más, az egész szervezetet érintő hatása. Ezért 15 napos kortól, mindennapos használatra alkalmas.

Higiéniai okokból egy palackot csak egy személy használjon. Ne ossza meg mással a terméket!

Próbálja ki az Aqua Maris® termékcsalád további termékeit is!

TERMÉKNÉV	FELHASZNÁLÁS	ÖSSZETÉTEL
Aqua Maris® Classic orspray	hidratálja és tisztítja az orrot, regenerálja az ornyálkahártyát	izotóniás tengervíz
Aqua Maris® Plus orspray	regenerálja az ornyálkahártyát	tengervíz d-pantenollal
Aqua Maris® Strong orspray	természetes úton szünteti meg az orrdugulást	hipertóniás (nagy sókoncentrációjú) tengervíz

FIGYELMEZTETÉS

A külső tartály semleges hajtógázt (nitrogént) tartalmaz, ami a tengervízzel nem érintkezik.

A tartályban túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Tilos felszúrni vagy tűzbe dobni, még használat után is. Hőtől, forró felületektől, szikráktól, nyílt lángtól és minden más gyújtóforrástól távol kell tartani. Használat közben dohányozni tilos. Napfénytől védeni kell. 50 °C feletti hőhatásnak tilos kitenni.

Gyermekektől elzárva tartandó.

A lejáratí idő után ne alkalmazza a terméket.

GYÁRTÓ

JGL d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Croatia

A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ UTOLSÓ FELÜLVIZSGÁLATÁNAK IDEJE

2022. június

A TERMÉKEN HASZNÁLT SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE

 Gyártási tételszám

 Lejáratí idő

 CE jelölés



**Az Aqua Maris termékek
mikroműanyag-mentes
tanúsítvánnyal rendelkeznek.**



K-28123-1.3

 130004808/01

 0373



PAP

jgl 